

QUICK & EASY Pack

rapid sensitiv

Gebrauchsfertige Desinfektionstücher
alkoholhaltig

- ✓ aldehyd-, phenol-, chlor- und alkalifrei
- ✓ wirksam gegen Noro-Viren
- ✓ Tränkflüssigkeit VAH gelistet



BAuA-Nr. N-71152

Präparat

Die gebrauchsfertigen Tücher dienen der umfassenden Schnelldesinfektion von Flächen und Gegenständen. Sie sind getränkt mit MediSept rapid sensitiv, einem gebrauchsfertigen Desinfektionsmittel auf Basis von Alkoholen und quartären Ammoniumverbindungen. Das Mittel ist frei von Aldehyden, Phenol, Chlor und Alkali. Aufgrund der erstklassigen Vliesstoffqualität ist eine bestmögliche Wirkstoffabgabe gewährleistet.

Anwendungsbereiche

Quick & Easy Pack rapid sensitive haben sich in Krankenhäusern, Arztpraxen, Alten- und Pflegeheimen, Rettungswagen sowie in Tattoo-, Piercing- und Kosmetikstudios bewährt. Zudem sind sie für den Einsatz in Großküchen, in Gemeinschaftseinrichtungen und auf empfindlichen Oberflächen (z.B. Acrylglas oder Kunstleder) geeignet.

Anwendung

Die zu desinfizierende Fläche wird gleichmäßig und vollständig mit den gebrauchsfertigen Tüchern abgewischt. Anschließend muss das Mittel einwirken und die desinfizierten Flächen müssen abtrocknen.

Die entsprechenden Einwirkzeiten sind unter gleichnamigem Punkt (s.u.) aufgeführt. Das Desinfektionsmittel trocknet nahezu rückstandsfrei ab.

Wirkungsspektrum

Die Daten beziehen sich auf die Tränkflüssigkeit MediSept rapid sensitiv:

- bakterizid
- levurozid
- tuberkulozid
- begrenzt virusinaktivierend

Einwirkzeit

Die Daten beziehen sich auf die Tränkflüssigkeit MediSept rapid sensitiv:

Noro-Viren	5 Min.
HCV	30 Sek.
HBV, HIV	30 Sek.
Vaccinia-Viren	30 Sek.
Tb-Bakterien	2 Min.
Bakterien inkl. MRSA	1 Min.
Hefepilze	1 Min.

QUICK & EASY Pack

rapid sensitiv

Gebrauchsfertige Desinfektionstücher
alkoholhaltig

Lieferformen

Bezeichnung	Blattformat	Blattzahl	Artikel-Nr.	VPE
quick & easy rapid sensitiv	ca. 20 x 20 cm	60 Blatt	251060201240204	16 Flowpacks
	ca. 30 x 20 cm	35 Blatt	251035291240204	16 Flowpacks

Inhaltsstoffe

100 g Lösung enthalten:
17 g Propanol
0,25 g Alkyl-benzyl-dimethyl-ammoniumchlorid
(50%)
Hilfsstoffe und Wasser

Gefahrenhinweise

Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen. Inhalt/Behälter gemäß den nationalen Vorschriften entsorgen. An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht verschlossen halten. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Etikett bereithalten. Vor Gebrauch Etikett lesen.

Physikalische Daten

Die Daten beziehen sich auf die Tränkflüssigkeit MediSept rapid sensitiv:
Form / Farbe: klare, farblose Lösung
pH-Wert: 6,5 - 7,5

Gutachten

Die Daten beziehen sich auf die Tränkflüssigkeit MediSept rapid sensitiv:
HygCen Austria (Prof. Dr. med. Werner):
- Gutachten zur Flächendesinfektion gem. DGHM-/VAH-Richtlinien
- Gutachten zur Flächendesinfektion gem. EN 16615 (2015) Norm
Priv. Doz. Dr. med. habil. Schrader (Facharzt für Hygiene):
- Gutachten zur Flächendesinfektion gem. DGHM-/VAH-Richtlinien

Produktstatus / Listungen

Die Tränkflüssigkeit MediSept rapid sensitiv ist aufgenommen in die aktuelle Desinfektionsmittel-Liste des VAH.
Registriert als Biozid-Produkt bei der BAuA (Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin) gem. Biozidgesetz: N-71152

Umweltinformationen

Unsere Produkte werden nach modernen, sicheren und umweltschonenden Verfahren hergestellt. Durch die Einhaltung hoher Qualitätsstandards wird eine gleichbleibende, sehr gute Produktqualität sichergestellt.