

QUICK & EASY

rapid sensitiv

Gebrauchsfertige Desinfektionstücher
alkoholhaltig

- ✓ aldehyd,- phenol-, chlor- und alkalifrei
- ✓ wirksam gegen Noro-Viren
- ✓ Tränkflüssigkeit VAH gelistet



BAuA-Nr. N-71152

Präparat

Die gebrauchsfertigen Tücher dienen der umfassenden Schnelldesinfektion von Flächen und Gegenständen. Sie sind getränkt mit MediSept rapid sensitiv, einem gebrauchsfertigen Desinfektionsmittel Alkoholen und quartären Ammoniumverbindungen. Das Mittel ist frei von Aldehyden, Phenol, Chlor und Alkali.

Aufgrund der erstklassigen Vliesstoffqualität ist eine bestmögliche Wirkstoffabgabe gewährleistet.

Anwendungsbereiche

Quick & easy rapid sensitiv haben sich in Krankenhäusern, Arztpraxen, Alten- und Pflegeheimen, Rettungswagen sowie in Tattoo-, Piercing- und Kosmetikstudios bewährt. Zudem sind sie für den Einsatz in Großküchen, in Gemeinschaftseinrichtungen und auf empfindlichen Oberflächen (z.B. Acrylglas oder Kunstleder) geeignet.

Anwendung

Die Vliestuchrolle wird in das Spendersystem eingesetzt. Danach wird ein Desinfektionstuch aus der Mitte der Rolle genommen, durch die Entnahmeöffnung des Deckels geführt und der Deckel wird wieder verschlossen.

Die zu desinfizierende Fläche wird gleichmäßig und vollständig mit der gebrauchsfertigen Lösung benetzt. Anschließend muss das Mittel einwirken und die desinfizierten Flächen müssen abtrocknen. Die entsprechenden Einwirkzeiten sind unter gleichnamigem Punkt (s.u.) aufgeführt. Das Desinfektionsmittel trocknet nahezu rückstandsfrei ab.

Wirkungsspektrum

Die Daten beziehen sich auf die Tränkflüssigkeit MediSept rapid sensitiv:

- bakterizid
- levurozid
- tuberkulozid
- begrenzt virusinaktivierend

Einwirkzeit

Die Daten beziehen sich auf die Tränkflüssigkeit MediSept rapid sensitiv:

Noro-Viren	5 Min.
HCV	30 Sek.
HBV, HIV	30 Sek.
Vaccinia-Viren	30 Sek.
Tb-Bakterien	2 Min.
Bakterien inkl. MRSA	1 Min.
Hefepilze	1 Min.

QUICK & EASY**rapid sensitiv****Gebrauchsfertige Desinfektionstücher****Lieferformen**

Bezeichnung	Blattzahl	Artikel-Nr.	VPE
quick & easy rapid sensitiv	30 Blatt	MSW2030	6 Rollen
	70 Blatt	MSW2070	3 Rollen

Inhaltsstoffe

100 g Lösung enthalten:
 17 g Propanol
 0,25 g Alkyl-benzyl-dimethyl-ammoniumchlorid
 Hilfsstoffe und Wasser

Gefahrenhinweise

Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen. Inhalt/Behälter gemäß den nationalen Vorschriften entsorgen. An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht verschlossen halten. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Etikett bereithalten. Vor Gebrauch Etikett lesen.

Physikalische Daten

Die Daten beziehen sich auf die Tränkflüssigkeit MediSept rapid sensitiv:
 Form / Farbe: klare, farblose Lösung
 pH-Wert: 6,5 - 7,5

Gutachten

Die Daten beziehen sich auf die Tränkflüssigkeit MediSept rapid sensitiv:
 HygCen Austria (Prof. Dr. med. Werner):
 - Gutachten zur Flächendesinfektion gem. DGHM-/VAH-Richtlinien
 - Gutachten zur Flächendesinfektion gem. EN 16615 (2015) Norm
 Priv. Doz. Dr. med. habil. Schrader (Facharzt für Hygiene):
 - Gutachten zur Flächendesinfektion gem. DGHM-/VAH-Richtlinien

Produktstatus / Listungen

Die Tränkflüssigkeit MediSept rapid sensitiv ist aufgenommen in die aktuelle Desinfektionsmittel-Liste des VAH.
 Registriert als Biozid-Produkt bei der BAuA (Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin) gem. Biozidgesetz: N-71152

Umweltinformationen

Unsere Produkte werden nach modernen, sicheren und umweltschonenden Verfahren hergestellt. Durch die Einhaltung hoher Qualitätsstandards wird eine gleichbleibende, sehr gute Produktqualität sichergestellt.