

Einwegtücher für die hygienische Flächendesinfektion

- ✓ **hygienisches Einwegsystem**
- ✓ **universelle Praktikabilität**
- ✓ **einfache Handhabung**
- ✓ **zur Tränkung mit allen üblichen
Flächendesinfektionsmitteln**



Vliestuchrolle

Das SmartBag-System besteht aus einer trockenen Vliestuchrolle und einem Standbodenbeutel mit Tragegriff. Jeder Standbodenbeutel ist mit einer Feuchttuchentnahme ausgestattet. Diese Entnahme lässt sich herausdrehen, wodurch das Tränken der Tuchrolle mit jedem beliebigen Desinfektionsmittel möglich ist.


Die Vliestuchrolle besteht aus einem 100%-igen Polyestervlies und stellt somit eine optimale Wirkstoffabgabe bei der Anwendung sicher. Zudem ist sie aufgrund der Quervernetzung extrem reißfest und strapazierfähig.

Durch die Einzelblattentnahme aus dem wieder-verschließbaren System ist der SmartBag sehr sparsam im Verbrauch.


Anwendungsbereiche

Das SmartBag System ist speziell für Bereiche mit hohem Infektionsrisiko entwickelt. Durch das Einwegsystem entfällt die Aufbereitung des Spenders, wodurch das Risiko einer Kreuzkontamination minimiert wird. Die Entsorgungskosten werden minimiert.

Anwendung

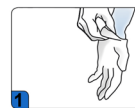

1. Handschuhe anlegen.

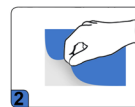

2. Originalitätssiegel entfernen.



3. Durch Drehen entgegen dem Uhrzeigersinn Tuchentnahme entfernen.



4. Ca. 2,5 Liter gebrauchsfertige Desinfektionslösung einfüllen.



5. Das erste Tuch durch die Rückseite der Tuchentnahme führen.



6. Durch Drehen im Uhrzeigersinn die Tuchentnahme wieder einsetzen.



7. Oberflächen oder Geräte sorgfältig wischen, dabei auf vollständige Benetzung achten und die Einwirkzeiten des jeweiligen Desinfektionsmittels einhalten.

Stand: 07-2018

Einwegtücher für die hygienische Flächendesinfektion

Gutachten

Die Wirksamkeit der Anwendungslösung nach 28 Tagen mit marktüblichen Flächendesinfektionsmitteln im Spendersystem ist für die Anwendung mit MediWipes durch externe, unabhängige Labors begutachtet.

Für folgende Flüssigkeiten ist ein 4 Felder Flächentest Gutachten auf Anfrage erhältlich:

- MediSept rapid „melone“
- Biguanid Fläche N
- Incidin Extra N
- Incidin Plus
- Microbac forte

Umweltinformationen

Unsere Produkte werden nach modernen, sicheren und umweltschonenden Verfahren hergestellt. Durch die Einhaltung hoher Qualitätsstandards wird eine gleichbleibende, sehr gute Produktqualität sichergestellt.

Lieferformen

Tuchqualität	Material	Blattmaß	Blattzahl	Artikel-Nr.	VPE
--------------	----------	----------	-----------	-------------	-----

auf Anfrage

Stand: 07-2018