

# QUICK & EASY

## rapid sensitiv

**Gebrauchsfertige Desinfektionstücher**  
alkoholhaltig

- ✓ aldehyd,- phenol-, chlor- und alkalifrei
- ✓ wirksam gegen Noro-Viren
- ✓ Tränkflüssigkeit VAH gelistet



BAuA-Nr. N-71152

### Präparat

Die gebrauchsfertigen Tücher dienen der umfassenden Schnelldesinfektion von Flächen und Gegenständen. Sie sind getränkt mit MediSept rapid sensitiv, einem gebrauchsfertigen Desinfektionsmittel Alkoholen und quartären Ammoniumverbindungen. Das Mittel ist frei von Aldehyden, Phenol, Chlor und Alkali.

Aufgrund der erstklassigen Vliesstoffqualität ist eine bestmögliche Wirkstoffabgabe gewährleistet.

### Anwendungsbereiche

Quick & easy rapid sensitiv haben sich in Krankenhäusern, Arztpraxen, Alten- und Pflegeheimen, Rettungswagen sowie in Tattoo-, Piercing- und Kosmetikstudios bewährt. Zudem sind sie für den Einsatz in Großküchen, in Gemeinschaftseinrichtungen und auf empfindlichen Oberflächen (z.B. Acrylglas oder Kunstleder) geeignet.

### Anwendung

Die Vliestuchrolle wird in das Spendersystem eingesetzt. Danach wird ein Desinfektionstuch aus der Mitte der Rolle genommen, durch die Entnahmeöffnung des Deckels geführt und der Deckel wird wieder verschlossen.

Die zu desinfizierende Fläche wird gleichmäßig und vollständig mit der gebrauchsfertigen Lösung benetzt. Anschließend muss das Mittel einwirken und die desinfizierten Flächen müssen abtrocknen. Die entsprechenden Einwirkzeiten sind unter gleichnamigem Punkt (s.u.) aufgeführt. Das Desinfektionsmittel trocknet nahezu rückstandsfrei ab.

### Wirkungsspektrum

Die Daten beziehen sich auf die Tränkflüssigkeit MediSept rapid sensitiv:

- bakterizid
- levurozid
- tuberkulozid
- begrenzt virusinaktivierend

### Einwirkzeit

Die Daten beziehen sich auf die Tränkflüssigkeit MediSept rapid sensitiv:

Noro-Viren	5 Min.
HCV	30 Sek.
HBV, HIV	30 Sek.
Vaccinia-Viren	30 Sek.
Tb-Bakterien	2 Min.
Bakterien inkl. MRSA	1 Min.
Hefepilze	1 Min.

Stand: 07-2018



WHR GmbH  
Am Galgenturm 2  
97638 Mellrichstadt

Tel: +49 (0) 9776 7049 10  
Fax: +49 (0) 9776 7049 129  
Mail: info@whrgmbh.de  
www.whrgmbh.de

# QUICK & EASY

*rapid sensitiv*

## Gebrauchsfertige Desinfektionstücher

### Lieferformen

Bezeichnung	Material	Blattformat	Blattzahl	Artikel-Nr.	VPE
quick & easy rapid sensitiv	PET <small>glatt</small>	ca. 30 x 30 cm	30 Blatt	MSW2030	6 Rollen
			70 Blatt	MSW2070	3 Rollen
		ca. 30 x 15 cm	60 Blatt	6000-2003	6 Rollen

### Inhaltsstoffe

100 g Lösung enthalten:  
 17 g Propanol  
 0,25 g Alkyl-benzyl-dimethyl-ammoniumchlorid  
 Hilfsstoffe und Wasser

### Gefahrenhinweise

Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen. Inhalt/Behälter gemäß den nationalen Vorschriften entsorgen. An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht verschlossen halten. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Etikett bereithalten. Vor Gebrauch Etikett lesen.

### Physikalische Daten

Die Daten beziehen sich auf die Tränkflüssigkeit MediSept rapid sensitiv:

Form / Farbe: klare, farblose Lösung  
 pH-Wert: 6,5 - 7,5

### Gutachten

Die Daten beziehen sich auf die Tränkflüssigkeit MediSept rapid sensitiv:

HygCen Austria (Prof. Dr. med. Werner):

- Gutachten zur Flächendesinfektion gem. DGHM-/VAH-Richtlinien

- Gutachten zur Flächendesinfektion gem. EN 16615 (2015) Norm

Priv. Doz. Dr. med. habil. Schrader (Facharzt für Hygiene):

- Gutachten zur Flächendesinfektion gem. DGHM-/VAH-Richtlinien

### Produktstatus / Listungen

Die Tränkflüssigkeit MediSept rapid sensitiv ist aufgenommen in die aktuelle Desinfektionsmittel-Liste des VAH.

Registriert als Biozid-Produkt bei der BAuA (Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin) gem. Biozidgesetz: N-71152

### Umweltinformationen

Unsere Produkte werden nach modernen, sicheren und umweltschonenden Verfahren hergestellt. Durch die Einhaltung hoher Qualitätsstandards wird eine gleichbleibende, sehr gute Produktqualität sichergestellt.

Stand: 07-2018